

Gelodouble S

Dublirna masa za dubliranje modelov iz mavca in vložnih mas ter za livno tehniko akrilatnih mas.
Duplicating material for plaster and investment material models and for acrylic casting technique.

Дублирующая масса для дублирования моделей из гипса и паковочных масс,
а также для техники литья акриловых масс.



Gelodouble S raztopi na 93 °C.
Melt Gelodouble S on 93 °C.
Gelodouble S растапливать на 93 °C.



Ohladi ga na 48 °C.
Allow to cool down on 48 °C.
Охладить до 48 °C.



Model namoči v vodo na 38 °C 5 minut.
Soak model 5 minutes on 38 °C.
Модель замачивать на 38 °C 5 минут.



Odvečno vodo popivnaj z robčkom.
Dry model with cloth.
Лишнюю воду промокнуть салфеткой.



Kiveto z modelom napolni z Gelodoublom S.
Fill Gelodouble S in the flask.
Кювету с моделью залить с Gelodoubl S.



Ohlajaj na zraku 60-90 minut.
Let cool down on air for 60-90 min.
Охлаждать на воздухе 60-90 минут.



Odstrani model iz Gelodouble S. Duplikat pusti 10min
na sobni temp. nato ga napolni z mavcem.
Remove model from Gelodouble S. Leave duplicate 10
min on room temperature than fill it with the plaster.
Удалите модель из Gelodouble S. Оставьте дубликат
на 10 минут на комнатной температуре, затем заполните его гипсом.



Pusti mavce 45-60 min, da se strdi. Nato ga odstrani.
Gelodouble S sperj s čisto vodo.
Leave plaster 45 - 60 min to become hard and then
remove it. Gelodouble S wash with clear water.
Оставьте гипс на 45-60 мин, пока не
затвердеет. Затем его удалить.
Gelodouble S промыть чистой водой.



Pri ponovni uporabi dodajte vodo, cca. 10-15 ml na 1 kg gela.
When reusing, add water approx. 10-15 ml per 1 kg gel.
При повторном использовании добавьте воды, из
расчёта 10-15 мл на 1 кг геля.

