



KATALOG

REZKARJI ZA CAD/CAM



Rezarji so izjemno pomemben faktor za doseg kvalitativnih izdelkov v CAD/CAM tehnologiji rezkanja. Med samim rezkanjem vplivajo tudi na ekonomičnost celotnega procesa.

Rezarji so namenjeni za uporabo v odprtih rezkalnih enotah, ki omogočajo vpenjanje rezkarjev premera $\varnothing 6\text{mm}$, skupne dolžine 50mm .

Rezarji so na voljo z obročem ali brez, glede na sistem vpenjanja vaše rezkalne enote.

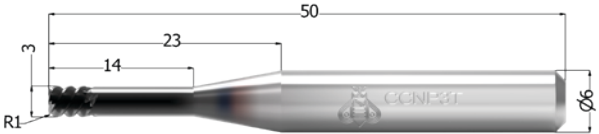
Ob naročilu je potrebno pri redni naročniški številki na koncu dodati R. (primer: CCNP2BR)



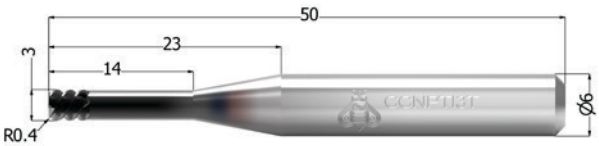
Rezarja z obročem

Rezarja brez obroča

Rezkarji - CoCr

REF	Velikost (mm)	Oblika	Globina reza	mm/s	mm/min	Obrati(RPM)	Možnost brušenja
CCNP3T		Torus	0,10-0,15	45 - 55	2700 - 3300	12.000 - 14.000	Suho

Rezkarji - Ti

CCNPTI3T		Torus	0,10-0,15	45 - 55	2700 - 3300	12.000 - 14.000	Mokro
----------	---	-------	-----------	---------	-------------	-----------------	-------

Rezarji za CoCr se uporabljajo za rezkanje ogrodij za krone in mostičke, gredi, toronto mostove, dela na implantatih.



Prikazano delo je bilo narejeno v našem rezkalnem centru v Sloveniji iz Interdent diska CC DISK NF CoCr.

Rezkarji - CoCr in Ti

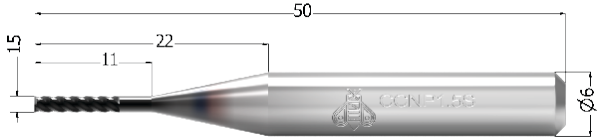
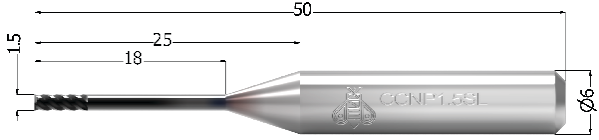
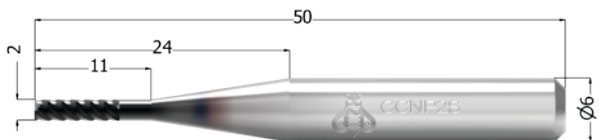
REF	Velikost (mm)	Oblika	Globina reza	mm/s	mm/min	Obrati(RPM)	Možnost brušenja	
CCNP2B		2	Krogla	0,10-0,25	20 - 30	1200 - 1800	20.000 - 26.000	Mokro/Suho
CCNP1.5B		1,5	Krogla	0,10-0,20	20 - 30	1200 - 1800	25.000 - 30.000	Mokro/Suho
CCNP1B		1	Krogla	0,07-0,12	15-25	900 - 1500	30.000 - 35.000	Mokro/Suho
CCNP0.6B		0.6	Krogla	0,03-0,08	5-13	300 - 700	32.000 - 40.000	Mokro/Suho

Rezkarji - CoCr in Ti

REF	Velikost (mm)	Oblika	Globina reza	mm/s	mm/min	Obrati(RPM)	Možnost brušenja
 CCNP1.5P	1,5	Koničast	0,10 - 0,15	1 - 3	50-150	9.000 - 9.500	Mokro/Suho
 CCNP2.5P	2,5	Koničast	0,10 - 0,15	1 - 3	50-150	9.000 - 9.500	Mokro/Suho



Rezkarji - Univerzalni

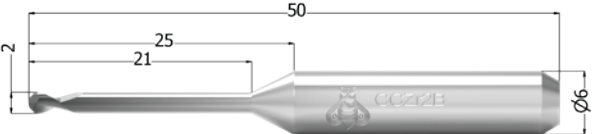
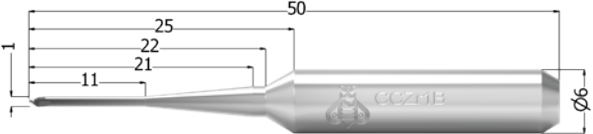
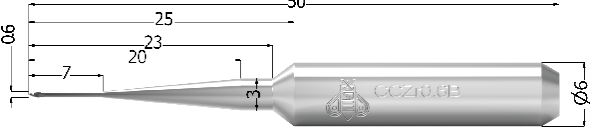
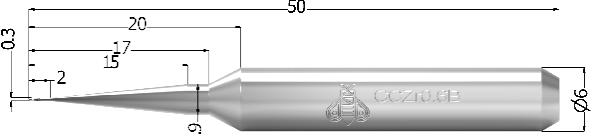
REF	Velikost (mm)	Oblika	Globina reza	mm/s	mm/min	Obrati(RPM)	Možnost brušenja	
CCNP1.5S		1,5	Raven	0,03-0,08	5-13	300 - 700	20.000 - 25.000	Mokro/Suho
CCNP1.5SL		1,5	Raven	0,03-0,08	5-13	300 - 700	20.000 - 25.000	Mokro/Suho
CCNP2S		2	Raven	0,03-0,08	5-13	300 - 700	20.000 - 25.000	Mokro/Suho

Rezarji za Zr se uporabljajo za rezkanje ogrodij ali polno anatomskih oblik za krone in mostičke, inlay, onlay, toronto mostove, dela na implantatih.

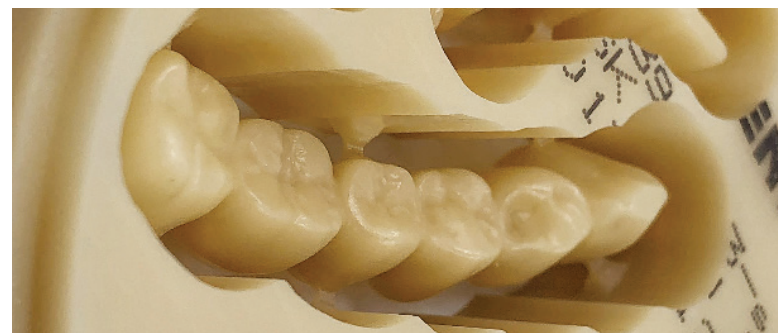


Prikazano delo je bilo narejeno v našem rezkalnem centru v Sloveniji iz Interdent diska CC DISK Zr.

Rezkarji - Zr

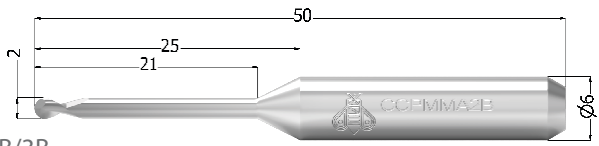
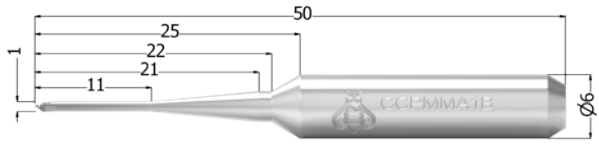
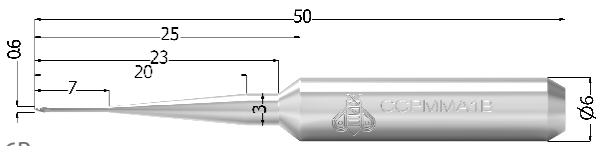
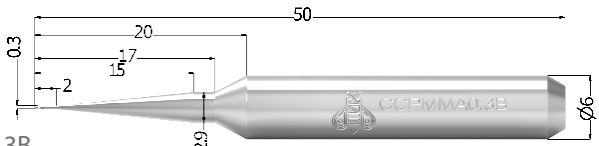
REF	Velikost (mm)	Oblika	Globina reza	mm/s	mm/min	Obrati(RPM)	Možnost brušenja
 <p>Technical drawing of drill bit CCZR2B. Dimensions: total length 50 mm, cutting edge length 25 mm, cutting edge diameter 2 mm, cutting edge thickness 21 mm, and shank diameter $\varnothing 6$ mm.</p>	2	Krogla	0,50 – 1,00	20 - 25	1200 - 1500	20.000 – 24.000	Suho
 <p>Technical drawing of drill bit CCZR1B. Dimensions: total length 50 mm, cutting edge length 25 mm, cutting edge diameter 1 mm, cutting edge thickness 22 mm, cutting edge thickness 21 mm, and shank diameter $\varnothing 6$ mm.</p>	1	Krogla	0,07 – 0,10	15 - 20	900 - 1200	25.000 – 28.000	Suho
 <p>Technical drawing of drill bit CCZR0.6B. Dimensions: total length 50 mm, cutting edge length 25 mm, cutting edge diameter 0.6 mm, cutting edge thickness 23 mm, cutting edge thickness 20 mm, cutting edge thickness 7 mm, cutting edge thickness 3 mm, and shank diameter $\varnothing 6$ mm.</p>	0.6	Krogla	0,05 – 0,08	15 - 20	900 - 1200	25.000 – 27.000	Suho
 <p>Technical drawing of drill bit CCZR0.3B. Dimensions: total length 50 mm, cutting edge length 20 mm, cutting edge diameter 0.3 mm, cutting edge thickness 17 mm, cutting edge thickness 15 mm, cutting edge thickness 2 mm, cutting edge thickness 2.9 mm, and shank diameter $\varnothing 6$ mm.</p>	0.3	Krogla	0,03 – 0,05	8 - 10	480 - 600	27.000 – 32.000	Suho

Rezarji za PMMA se uporabljajo za rezkanje ogrodij ali polno anatomskih oblik za izdelavo provizorijev, za pripravo ogrodij za ulivanje ter za rezkanje baz totalnih, parcialnih in začasnih protez in še mnogo več.



Prikazano delo je bilo narejeno v našem rezkalnem centru v Sloveniji iz Interdent diska CC DISK PMMA.

Rezkarji - PMMA

REF	Velikost (mm)	Oblika	Globina reza	mm/s	mm/min	Obrati(RPM)	Možnost brušenja
 <p>CCPMMA2B/3B</p>	2 ali 3	Krogla	0,20 - 0,60	25 - 30	1500 - 1800	14.000 - 25.000	Mokro/Suho
 <p>CCPMMA1B</p>	1	Krogla	0,20 - 0,60	25 - 30	1500 - 1800	15.000 - 18.000	Mokro/Suho
 <p>CCPMMA0.6B</p>	0.6	Krogla	0,08 - 0,12	22 - 30	1300 - 1800	20.000 - 25.000	Mokro/Suho
 <p>CCPMMA0.3B</p>	0.3	Krogla	0,05 - 0,08	15 - 25	900 - 1500	25.000 - 30.000	Mokro/Suho



INTERDENT d.o.o.
Opekarniška cesta 26 · 3000 Celje · SLOVENIA
T: +386 (0)3 425 62 00 · E: info@interdent.cc
www.interdent.cc



CAD/CAM rezkalne enote



Skenerji & SW



CAD/CAM materiali



CAD/CAM rezkalni in print center